

Einsetzen und Herausnehmen


Das Einsetzen und Herausnehmen Ihrer Augenprothese: Mit etwas **Übung** geht es ganz leicht.

Gründliches Händewaschen ist absolut notwendig, bevor die Prothese mit den Fingern berührt wird.


Zur Vermeidung von Beschädigungen sollte das Einsetzen und Herausnehmen des künstlichen Auges grundsätzlich über einer weichen Unterlage (z.B. Handtuch) erfolgen. Zu vermeiden ist das Hantieren über dem Waschbecken, über Fliesen und Steinböden. Augenprothesen aus Glas können zerbrechen oder durch Kratzer beschädigt werden.

Am Anfang mag das Einsetzen der Prothese noch ein wenig ungewohnt vorkommen, aber mit etwas Übung geht es ganz leicht. Sollten dennoch Schwierigkeiten auftauchen, ist es notwendig, den Rat des Ocularisten einzuholen.


Das Einsetzen der Augenprothese:

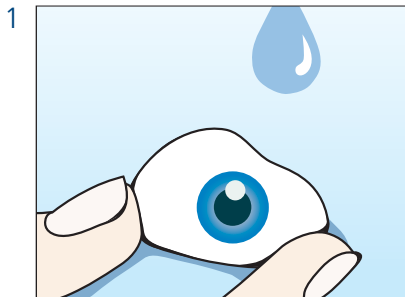


(1) Die Augenprothese anfeuchten.

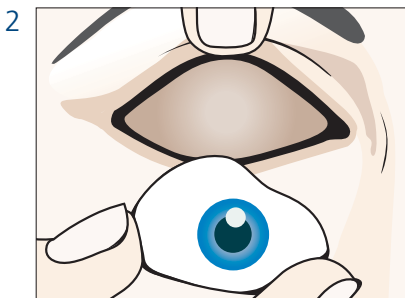


(2) Die linke Hand zieht das obere Lid nach oben und die rechte Hand legt die Augenprothese auf das untere Lid.

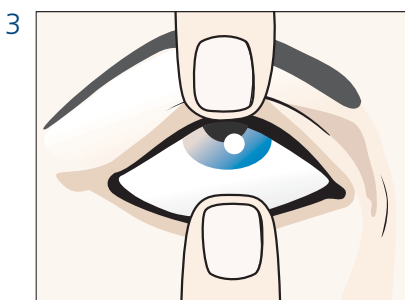

(3) Die Augenprothese so weit wie möglich nach oben in die Augenhöhle schieben.

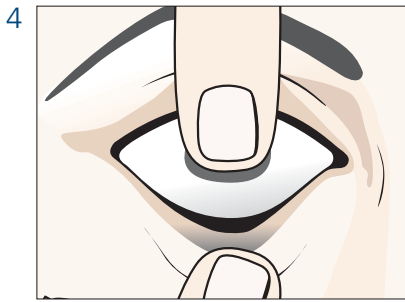


(4) Mit der linken Hand die Augenprothese in dieser Lage halten und das Augenlid mit der rechten Hand hervorziehen.

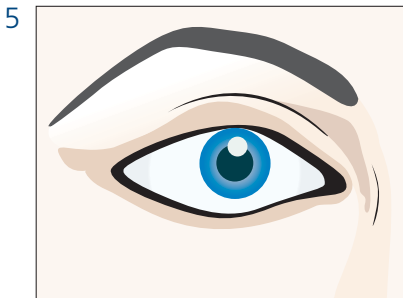


(5) Die Augenprothese schiebt sich nun selbständig in die richtige Position.


Das Herausnehmen der Augenprothese:

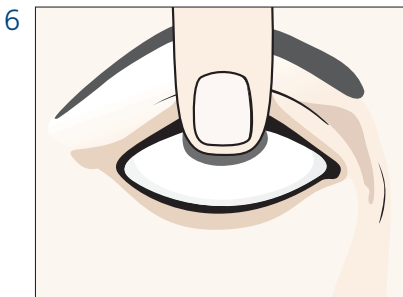

(6) Blick nach oben richten und den linken Zeigefinger auf die Augenprothese legen.

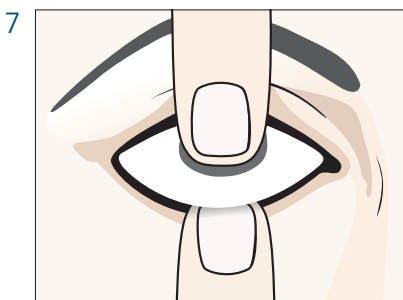

(7) Mit dem rechten Zeigefinger auf den Unterlidrand fassen und das Lid hinter den unteren Rand der Prothese drücken.

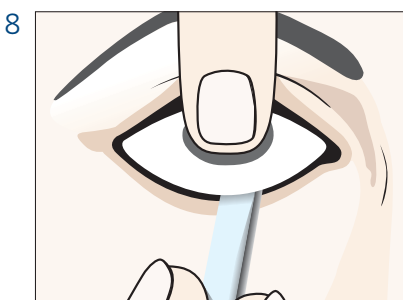

(8) Oder: Ein stumpfes Stäbchen hinter den unteren Rand der Augenprothese schieben und die Prothese herausheben. (Das Stäbchen können Sie bei Ihrem Ocularisten erhalten.)